

オクルパッド®の取り扱いについて


1. 訓練眼を確認し、訓練眼にのみ見える偏光メガネを用意する。

間違い防止の為に、タンジブル・ブロック及び偏光メガネに患児名を記入する。

注意：訓練を行う眼（弱視眼）が偏光フィルターを通して画面が見える様に使用して下さい。決して健眼のみに画像が見えるメガネは使用しないで下さい。[健眼のみに画像が見える様（訓練を行わない眼）に使用すると、訓練効果が得られないだけでなく、場合によっては弱視眼の程度が進む可能性があります。]

注意：訓練を行う患眼を間違えない様、偏光メガネとブロックはセットにして患児名を記入して管理、使用後は双方とも廃棄して下さい。

2. 必要に応じて矯正メガネを装着し、その上から1.の偏光メガネを使用する。

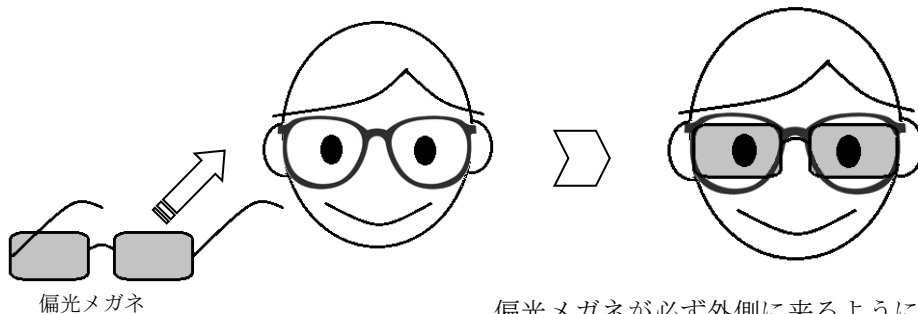

注意：偏光メガネは半年を超える訓練への長期使用はしないで下さい。[場合によっては長期使用により、偏光性能の劣化が多くなり、目的とする訓練効果が無くなる可能性があります。]

3. オクルパッド®のホームボタンを押し、アプリのアイコンを指でタッチしてゲームを選択する。



Oclu-pad アプリ (対象年齢 3歳以上)
 アリゲーム (固視及び追従運動訓練)
 風船ゲーム (固視訓練)
 ビズナツ (視力同等簡易検査)



Oclu-pad Tangible アプリ
 さんぱつゲーム (固視訓練)
 おそうじゲーム (固視訓練)
 モグラたたき (固視訓練)
 どうぶつキャッチ (固視訓練)
 たまごはこび (追従運動訓練：水平)
 リフティング (追従運動訓練：垂直)
 エイリアンハンター (おまけ)
 カプセルトレイ (おまけ)

本製品は市販のタブレット端末を元に製作されています。タブレットの詳細な使い方については、iPad ユーザーガイド等をご参照ください。

注意：本器で動作確認されている iOS は 10 です。ソフトウェア・アップデートのお知らせが入っても、アップデートは行わないで下さい。動作しないか、動作が不安定になる可能性があります。


4. ゲームをスタートする。



Occlu-pad アプリ (対象年齢3歳以上) はSTARTをタッチしてゲームをスタートします。終了時にもSTOPをタッチしてゲームを終了する事により履歴(ログ)が残ります。



初期画面

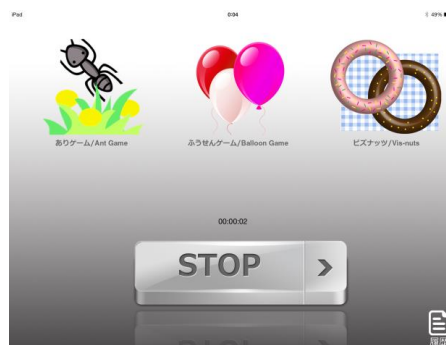

訓練画面(終了画面)

履歴ボタン



Occlu-pad Tangible アプリはゲームボタンを指でタッチしてゲームを選びます。このアプリのゲームはすべて「タンジブル・ブロック」を使って遊びます。



設定ボタン

5. 履歴(ログ)を確認する



画面右下にある「履歴」ボタンをタッチすると、訓練記録を閲覧できます。
閲覧にはパスワード設定はありません。



画面右上にある「設定」ボタンをタッチすると、訓練記録を閲覧できます。
閲覧にはパスワード「occlu」が必要です。

6. 使用後は適宜、充電を行ってください。

付属品



指導者偏光メガネ両眼用

偏光メガネ右眼用、左眼用

タンジブル・ブロック

医療機器製造販売届出番号 13B1X00049YG0001

製造販売元



株式会社 ジャパン フォーカス株式会社

本社/〒113-0033 東京都文京区本郷4-37-18(IROHA-JFCビル) ☎03(3815)2611
大阪/〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町1-4-15(SC明筋本町ビル) ☎06(6262)1099
URL: <http://www.japanfocus.co.jp>

総発売元

株式会社 JFCセールスプラン

本社/〒113-0033 東京都文京区本郷4-3-4(明治安田生命本郷ビル) ☎03(5684)8531(代)
大阪 ☎06(6271)3341 名古屋 ☎052(261)1931 福岡 ☎092(414)7360
URL: <http://www.jfcsp.co.jp>